

# BILAG 1

## Punkter i løbende serviceeftersyn

Et løbende serviceeftersyn anbefales mindst en gang årligt - første gang inden sengen tages i brug.


Eftersynet kan ske på hjælpemiddeldepotet eller hos bruger og skal foretages af kvalificeret personale.

Noter under serviceeftersynet, hvis der er dele som ikke fungerer optimalt eller hvor der konstateres dele som skal udskiftes eller udbedres.

Skemaet kan anvendes som et arbejdsredskab under serviceeftersynet samt til dokumentation i intern servicesystem.

 **Observerede fejl og mangler SKAL udbedres, før sengen tages i brug!**

 **For yderligere information om de enkelte punkter i det løbende serviceeftersyn, se afsnit 6.1 i Servicevejledningen.**

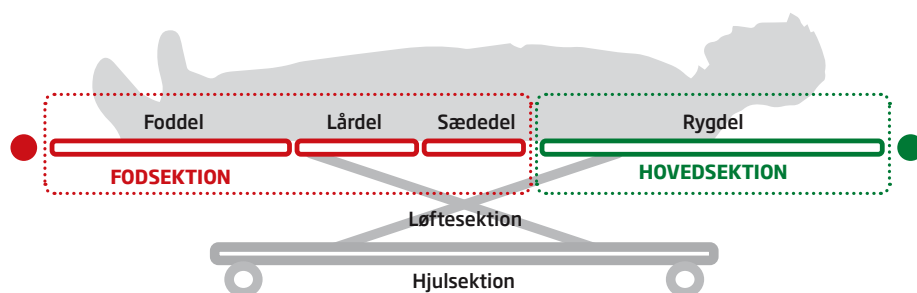

# BILAG 1: Løbende serviceeftersyn - SENG OG TILBEHØR

Vedrører sengemodeller: **OPUS 1CW** **OPUS 1DW** **OPUS S-DW**

SN-nr.:	Eget ID-nr.:
Dato:	Alder på seng:
Virksomhed:	Eftersyn foretaget af:

Punkter i løbende serviceeftersyn - SENG OG TILBEHØR		X	Noter
1	Visuel kontrol: Sengens generelle tilstand (synlige skader, skævhed, ridser i lak).		
2	Kontroller at alle ledninger er uden synlige skader, sidder korrekt og fastmonteret.		
3	Kontroller at seng kan køre frit op og ned og at alle funktioner på håndbetjening fungerer korrekt, uden at ledninger kommer i klemme eller trækkes ud.		
4	Kontroller at der ikke forekommer usædvanlige lyde, lugte eller uens kørsel.		
5	Kontroller at liggefladeforlænger er monteret og at den sidder korrekt.		
6	<b>OPUS 1CW</b> <b>OPUS 1DW</b> Kontroller at sengen er forsynet med madrassyrrer som passer til madrassbredden, at de er intakte og sidder korrekt og er fastspændt.		
7	<b>OPUS 1CW</b> <b>OPUS 1DW</b> Kontroller sengens hjul, bremses og retningsstyr.		
8	<b>OPUS 1CW</b> <b>OPUS 1DW</b> Kontroller gavle og gavlenes tilstand.		
9	<b>TILBEHØR:</b> Kontroller at sengeheste <b>OPUS 1CW</b> <b>OPUS 1DW</b> eller støttebøjle <b>OPUS S-DW</b> og beslag er stabile og korrekt spændt/monteret.		
10	<b>TILBEHØR:</b> Kontroller galge og galges tilstand.		
11	<b>TILBEHØR:</b> <b>OPUS 1CW</b> <b>OPUS 1DW</b> Kontroller batteri i henhold til specifik vejledning for den aktuelle batteritype. Vær opmærksom på batterilevetid.		
12	<b>OPUS S-DW</b> Tjek og efterspænd monteringsbeslagene på sengeramme og møtrikker under monteringsbeslag.		

Supplerende noter:

Fejl og mangler som skal udbedres:

Samlet vurdering (sæt et kryds)

Efter udført løbende serviceeftersyn er seng:

**GODKENDT**

**IKKE GODKENDT**