

BILAG 1

OPUS 7: Punkter i Serviceeftersyn

Serviceeftersyn af seng og tilbehør anbefales mindst en gang årligt.

Serviceeftersynet forebygger uforudsete reparationer og senge ude af drift. Det forlænger sengens levetid og fastholder brugerens, personalets og de pårørendes sikkerhed.

Serviceeftersynet kan foretages på teknisk afdeling af kvalificeret personale.

Noter under serviceeftersynet, hvis der er dele som ikke fungerer optimalt eller hvor der konstateres dele som skal udskiftes eller udbedres.

Skemaet kan anvendes som et arbejdsredskab under serviceeftersynet samt til dokumentation i intern servicesystem.



Observerede fejl og mangler SKAL udbedres, før sengen tages i brug!




Serviceintervallet er vejledende. Det er ejer, der har det fulde ansvar for at sengen og tilbehøret er i forsvarlig stand og er sikkert at anvende.



For yderligere information om de enkelte punkter i serviceeftersynet, se afsnit 6 i Servicevejledningen.

SENGENS OPBYGNING

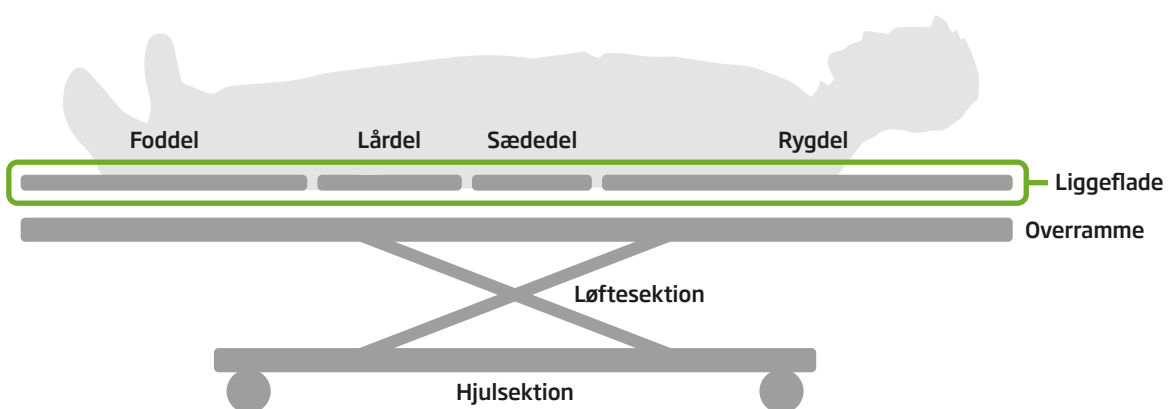

BILAG 1: Serviceeftersyn: SENG

Vedrører sengemodeller:

OPUS 7-10080 | OPUS 7-20085 | OPUS 7-30085 | OPUS 7-50085 | OPUS 7-51085

OPUS 7-60080 | OPUS 7-60085 | OPUS 7-61085

SN-nr.:	Eget ID-nr.:
Dato:	Alder på seng:
Virksomhed:	Eftersyn foretaget af:

Punkter i Serviceeftersyn: SENG		X	Noter
1	Fjern madras og eventuelt gavle. Kontroller lameller, sengebund og -ramme for synlige skader, afskallet lak eller løse lameller.		
2	Tag netstikket ud af stikkontakten og kontroller, at sengen kan køre op og ned fem gange, ved brug af batteri. Bipper batteriet, bør det udskiftes.		
3	Kontroller at netstik og netledning er intakt og tilslut det til kontrolboksen.		
4	Sæt netstikket i stikkontakten og kontroller at lampe på kontrolboks lyser (grøn = ok).		
5	Kontroller at håndbetjenerne og deres ledninger er intakte og er tilsluttet fordelerboksen.		
6	Kontroller at sengen kan køre frit op og ned og at alle funktioner på håndbetjenerne fungerer korrekt, uden uventet bevægelser, lyde eller ledninger der kommer i klemme eller trækkes ud af aktuator og styresystem: a. Kør liggeflade helt op (84 cm over gulv) og ned igen (33 cm over gulv). Kan undlades, hvis det er udført under pkt. 2. b. Kør fodende (lår- og foddelen) helt op, helt ned og derefter tilbage til vandret. c. Kør rygdelen helt op og helt igen. d. Kør funktionerne Trendelenburg, anti-Trendelenburg, stol, CPR, plan, vask og tørre. Se Brugsanvisningen afsnit 7.		
7	Vip rygdelen op og kontroller, at: a. Alle stik og ledninger til kontrolboks og fordelerboks er tilsluttet og intakte samt monteret i klips eller ophængt med strips, så de ikke beskadiges, når sengens bevægelige dele aktiveres. b. Aktuatorer er intakte, smurte og tilsluttet korrekt. Kontroller at låsering ved stikindgang er låst og låsering på begge sider af monteringsakslerne er intakte. c. Skruer, bolte og møtrikker er spændte, da de kan løsne sig over tid. Efterspændes ved behov. d. De bevægelige dele (som liggeflade og aksler) bevæger sig let og uden slør. e. Pomruller (under liggefladen), glideklodser (indvendig i løftesektionen) og madrasstyr er intakte og korrekt monteret. f. Nødfiret (mekanisk CPR-funktion) virker uden brug af personalehåndbetjeningen. Se Brugsanvisningen afsnit 5.7.		
8	Vip sædedelen op: a. Gennemgå punkt 7. a-d, på denne del af sengen. b. Vip sædedelen ned igen.		
9	Vip lår- og foddelen op: a. Gennemgå punkt 7. a-e, på denne del af sengen. b. Vip lår- og foddelen ned igen. c. Kontroller at den indbyggede liggefladeforlænger og gavlutdrækket kan trækkes ud. Kontroller at fingerskruer/positionsbolte er intakte.		
10	Sæt gavlene på sengen og kontroller gavlenes tilstand: Kontroller at gavlene er intakte og sidder fast på hjørnetapperne.		
11	Tag netstikket ud af stikkontakten og vikl netledningen omkring sengens ledningsholdere.		

... Punkter i serviceeftersyn: SENG		X	Noter
12	Hjul, bremser og retningsstyr: a. Efterse hjulene for urenheder, som kan sætte sig fast mellem hjulgafler og hjulbaner. b. Kontroller om hjulene er beskadiget eller sidder løs. c. Efterspænd alle dele til forbindelsesleddene til centralbremsesystemet. d. Lås hjulene og kontroller at bremserne virker. Med bremserne aktiveret skal sengen kunne fastholde sin position, også ved let skub på sengen. e. Lås hjulene op og kontroller om de kan dreje ubesværet og at retningsstyr virker. f. Kontroller at bremserne er forsynet med røde og grønne indikatorpropper.		
13	Kontroller at der er propper i alle rør-ender.		
14	Læg madrassen tilbage i sengen. Kontroller, at de fire madrassstyr sidder i position 2.		
15	Kontroller at alle mærkater er på sengen. Mærkaterne skal være læsbare og intakte. Mærkater kan genbestilles hos fabrikanten. Se mærkatoversigt i afsnit 9; Mærkning.		

Supplerende noter:

Fejl og mangler som skal udbedres:

Samlet vurdering (sæt et kryds)

Efter udført udvidet serviceeftersyn er SENG:

☐

GODKENDT

☐

IKKE GODKENDT

BILAG 1: Serviceeftersyn: SENGEHESTE

Vedrører sengemodeller:

OPUS 7-10080 | OPUS 7-20085 | OPUS 7-30085 | OPUS 7-50085 | OPUS 7-51085
OPUS 7-60080 | OPUS 7-60085 | OPUS 7-61085

Vare-nr.:	Eget ID-nr.:
Dato:	Alder på tilbehør:
Virksomhed:	Eftersyn foretaget af:

Punkter i Serviceeftersyn: SENGEHESTE		X	Noter
1	Kontroller sengehestenes generelle tilstand.		
2	Kontroller sengehestene for rust og skader.		
3	Kontroller for slidtage ved bevægelige dele.		
4	Kontroller at alle propper er intakte og sidder godt fast.		
5	Kontroller om der er løse skruer, bolte og møtrikker. Efterspænd sengehestene for at sikre jording.		
6	Klap sengehestene op og kontroller at udløserne låser korrekt.		
7	Klap sengehestene ned igen og kontroller for mislyde. De bevægelige dele kan smøres med et smøremiddel som WD40 på sprayflaske. Brug smørerør for præcis smøring.		
8	Kontroller at klemfare-mærkatet er på sengehestene. Se mærkatoversigt i afsnit 9; Mærkning.		

Supplerende noter:

Fejl og mangler som skal udbedres:

Samlet vurdering (sæt et kryds)

Efter udført Serviceeftersyn er SENGEHESTE:

☐

GODKENDT

☐

IKKE GODKENDT

BILAG 1: Serviceeftersyn: GALGE

Vedrører sengemodeller:

OPUS 7-10080 | OPUS 7-20085 | OPUS 7-30085 | OPUS 7-50085 | OPUS 7-51085
OPUS 7-60080 | OPUS 7-60085 | OPUS 7-61085

Vare-nr.:	Eget ID-nr.:
Dato:	Alder på tilbehør:
Virksomhed:	Eftersyn foretaget af:

Punkter i Serviceeftersyn: GALGE		X	Noter
1	Kontroller galgens tilstand.		
2	Kontroller galgen for rust og skader.		
3	Efterse strop for skader i syninger (bør skiftes hvert 4. år).		
4	Efterse triangel for revner (bør skiftes hvert 4. år).		
5	Kontroller at alle propper er intakte og sidder godt fast.		
6	Fjern galgen og kontroller monteringsbeslaget.		
7	Sæt galgen tilbage i beslaget og kontroller, at den sidder sikkert i begge positioner.		

Supplerende noter:

Fejl og mangler som skal udbedres:

Samlet vurdering (sæt et kryds)
Efter udført Serviceeftersyn er GALGE:

☐ GODKENDT ☐ IKKE GODKENDT

BILAG 1: Serviceeftersyn: DROPSTATIV

Vedrører sengemodeller:

OPUS 7-10080 | OPUS 7-20085 | OPUS 7-30085 | OPUS 7-50085 | OPUS 7-51085
OPUS 7-60080 | OPUS 7-60085 | OPUS 7-61085

Vare-nr.:	Eget ID-nr.:
Dato:	Alder på tilbehør:
Virksomhed:	Eftersyn foretaget af:

Punkter i Serviceeftersyn: DROPSTATIV		X	Noter
1	Kontroller dropstativets tilstand.		
2	Kontroller dropstativet for skader og skævhed.		

Supplerende noter:

Fejl og mangler som skal udbedres:

Samlet vurdering (sæt et kryds)

Efter udført Serviceeftersyn er DROPSTATIV:

☐

GODKENDT

☐

IKKE GODKENDT