

Careturner - Vendesystem til OPUS 7



Automatiseret trykaflastning

Bedre arbejdsstillinger og -miljø

2 til 1 plejer ved manuelle forflytninger

Komfort og tryghed for patienten



Kan monteres på følgende
OPUS 7-modeller:

OPUS 7-20085 | OPUS 7-51085
OPUS 7-30085 | OPUS 7-52085
OPUS 7-50085

Forflytning og trykaflastning i ét

Careturner - Vendesystem til OPUS 7 er en fuldautomatisk add-on-løsning som er udviklet og godkendt til brug på OPUS 7-hospitalsenge. Careturner kan trykaflaste og vende immobile patienter, så hospitalspersonalet undgår tunge løft og skæve vrid. Vingerne kan bevæge sig automatisk f.eks. om natten, hvilket kan give patienten en uforstyrret nattesøvn samtidig med, at risikoen for tryksår minimeres og behovet for tilseelser begrænses.

Careturner er et veldokumenteret vendesystem som let monteres på sengens overramme og som arbejder med sengens bevægelser.

Systemet består af længdegående vinger som kan hæves og sænkes i hver side eller i kombination.

Stillingsændringerne styres af et program, der kan køre automatisk eller manuelt vha. en håndbetjening.

Manuel kørsel

Vingerne hæves og sænkes med en intuitiv håndbetjening. Personalet styrer selv vinklingen, når patienten skal vendes eller forflyttes ol.

Automatisk kørsel


Vingerne kan køre automatisk i et kontinuerligt og roligt flow. Ud over et fast indstillet program, er der mulighed for at programmere to individuelle programmer.

Optimeret trykaflastning


Ved den automatiske kørsel, ændres borgerens trykpunkter løbende og forsigtigt. Det frigiver tid for personalet og giver ro for patienten som ikke skal forstyrres ifm. repositionering. Dette er særlig gavnligt om natten, hvor patienten kan få en mere uforstyrret nattesøvn og personalet vil kunne spare tilseelser ved de patienter, der har brug for at blive repositioneret i løbet af natten.

Trykpunktmåling af sengeliggende patient

Måling ved automatisk kørsel

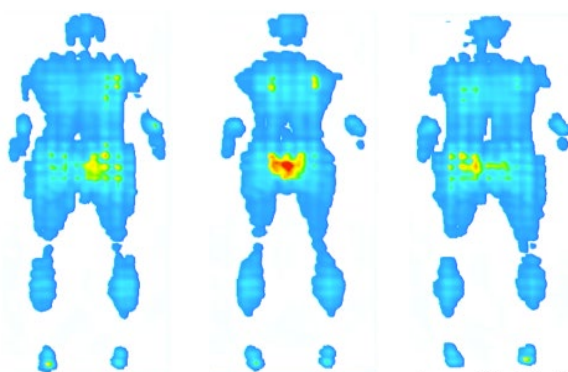

Løft højre side


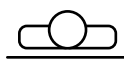


Ingen løft



Løft venstre side

Måling ved krammefunktion

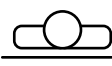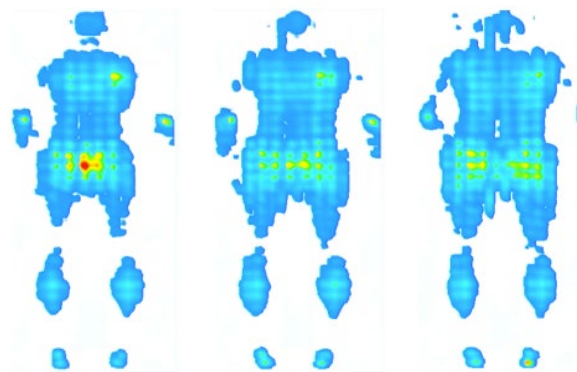

Ingen løft



15-15° løft



20-20° løft





1. Careturner monteres på OPUS 7-sengens overramme.




2. Betræk med elastikstropper påføres Careturner.



3. Elastikstropperne spændes om madrassen og sengen er klar.

Håndbetjening
Manuel styring af vinger.

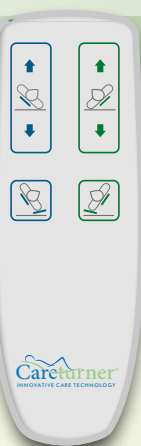

Styreboks
Automatisk styring af vinger.



Ved automatisk kørsel kører vingerne i et kontinuerligt flow.

Vinkler

Manuel kørsel: Max. 80° (en langside).
Automatisk kørsel: Max. 40° med 12° modhold.
Kombineret kørsel: Min. 90° (totalsum).

Målgrupper

- Patienter med få fysiske/kognitive ressourcer
- Patienter som er tryksårstruede
- Patienter med behov for palliativ pleje
- Patienter med stiv/ubevægelig krop
- Patienter med smerter som har brug for ekstra støtte
- Patienter som er udadreagerende
- Patienter som kræver to eller flere plejere
- Patienter hvis sengepleje er tung

SCAN/KLIK
OG SE VIDEO



SCAN/KLIK
OG SE CASES



Brugerne siger ...

SYGEPLEJERSKE A, OUH//

"Jeg tænker, at de kan lette både det fysiske og det mentale, altså den dårlige samvittighed man får, når man ikke har haft mulighed for at vende patienten så ofte, som man gerne ville."

SYGEPLEJERSKE B, OUH//

"Det kan være svært at honorere en vending hver anden time."

"Sengen hjælper mig i forhold til tunge løft. Det er lettere og man skal bruge mindre kræfter. Hvis man har en patient som laver modtryk, så gør sengen arbejdet for mig. Det er virkelig tidsbesparende!"

SYGEPLEJERSKE C, OUH//

"Det giver god samvittighed. Der er jo nogle, man ikke når at vende."

"Patienterne bliver flyttet flere gange om natten, end vi kan tilbyde manuelt."

"Sengen gør det meget roligt og på en måde, så patienten ikke opdager det på samme måde, som hvis vi kommer ind om natten og hiver og trækker i patienten."



VIDSTE DU

Careturner kan programmeres til at vippe stille fra side til side. Denne vugge-/kramme-funktion kan virke beroligende og give tryghed for patienten.

Vil du se og prøve Careturner inden du beslutter dig?

Vi tilbyder alle vores kunder en uforpligtende demonstration af Careturner på egen eller medbragt OPUS 7-seng.

Kontakt os på telefon 86 98 24 99 eller mail kr@ablenordic.dk og book et besøg eller et online videomøde.

Vi glæder os til at høre fra dig.



Med Careturner - Vendesystem til OPUS 7 får du:

- ✓ Et gennemtestet og sikkert hjælpemiddel.
- ✓ Et hjælpemiddel, der reducerer tryksår.
- ✓ En løsning, der både forebygger og hjælper ved forflytninger.
- ✓ Dokumenteret tidsbesparelser ved bl.a. vendinger.
- ✓ Mulighed for at gå fra 2 til 1-plejer ved flere opgaver.
- ✓ En løsning, der også kan kramme eller vugge borgeren.
- ✓ Dokumenteret tilbagebetalingstid på helt ned til 2 måneder.



FABRIKANT

Careturner[®]
INNOVATIVE CARE TECHNOLOGY

Careturner A/S
Lyskær 8B,
2730 Herlev
Danmark

FORHANDLER

able

able nordic a/s
Mågevej 16
8370 Hadsten
Tlf. 86 98 24 99
kr@ablenordic.dk
www.ablenordic.dk