

Quick Guide




SOFTWARE V.3 OPUS 7-60080 | OPUS 7-60085 | OPUS 7-61085



Se Brugsanvisningen, Servicevejledningen og Rengøringsvejledningen for uddybende information om de enkelte funktioner, installation, rengøring, service og reparation af sengen.

BRUGERBETJENING

Sengen stopper automatisk, når knapperne slippes og alle funktioner kan låses med personalebetjeningen.

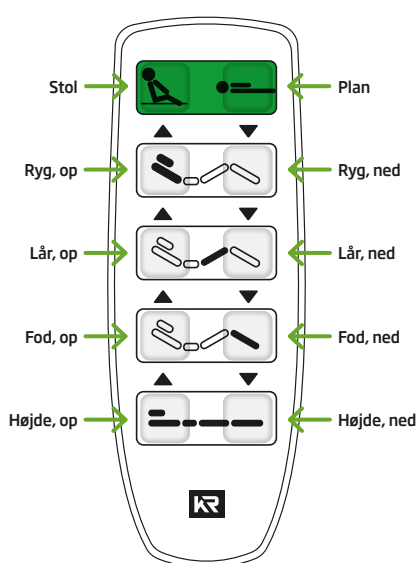

SENGEHEST

Sengen leveres med to integrerede personalebetjente sengeheste. Ved høje madrasser, kan der tilkøbes sengehest-forhøjere.



Pas på at arme, hænder, fingre o.l. ikke kommer i klemme, når sengehesten nedfældes. Hold kun fast i sengehestens overrør.



Pas på at brugeren ikke kravler over sengehestene for at komme ud af sengen. Der er risiko for at falde.



Betjening: Aktiver udløseren i hovedenden på sengens overramme og læg sengehesten ned. Modsat løftes sengehesten mod hovedenden, til den klikker på plads.

PERSONALEBETJENING (tohåndsbetjent)

For at forhindre utilsigtet aktivering af sengens funktioner, er personalebetjeningen tohåndsbetjent.

Hvis man vil aktivere en funktion, SKAL en af aktiveringsknapperne med symbolet "hånd" holdes inde, samtidigt med at man trykker på den ønskede funktion. Dette gælder samtlige funktioner med undtagelse af den elektriske CPR-funktion, "CPR".


Alle funktioner stopper automatisk, når knapperne slippes.

Låsefunktion

De funktioner som er forsynet med symbolet "hængelås" kan låses.

For at låse/låse op trykkes samtidigt på "låsefunktion" (nøglen) og den ønskede funktionsknap som ønskes låst/låst op.

Låste funktioner på personalebetjeningen låser tilsvarende funktioner på brugerbetjeningen.

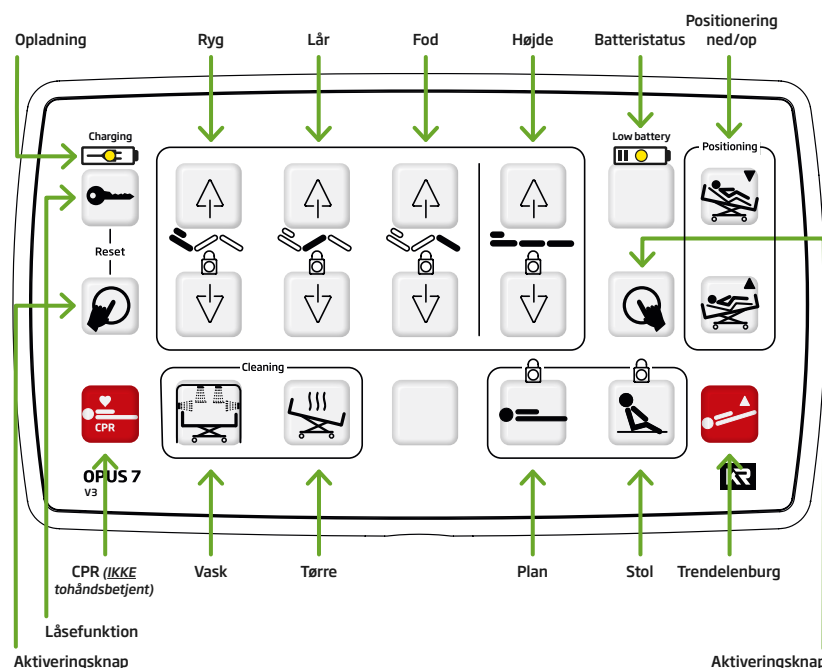


MADRAS

Sengen kan leveres med en komfortabel madras i skum.



Vær særligt opmærksom på madrashøjden i forhold til brug af sengehestforhøjer.

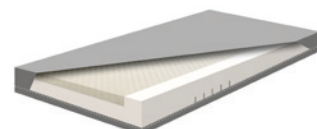

ANBEFALEDE MADRASMÅL

Model	Længde	Bredde	Højde	Højde ved brug af sengehestforhøjer
OPUS 7-60080	200 eller 220* cm	78-82 cm	10-15 cm	18-23 cm
OPUS 7-60085	200 eller 220* cm	82-86 cm	10-15 cm	18-23 cm
OPUS 7-61085	200 eller 220* cm	82-86 cm	10-15 cm	18-23 cm

*Ved forlænget liggeflade.

HJULPOSITIONER

Sengen er udstyret med drejelige hjul, retningsstyr og centralbremsesystem, der kan betjenes fra alle sengens hjørner. Aktiveres en pedal, reagerer alle hjulene.

⚠️ Vigtigt! Sengens bremses skal altid aktiveres, når sengen ikke skal flyttes, for at undgå ulykker.


VANDRET = HJULENE ER FRI



NEUTRAL

Hjulene er frie og bevægelige i alle retninger.

RØD PEDAL NED = HJULENE ER BREMSET

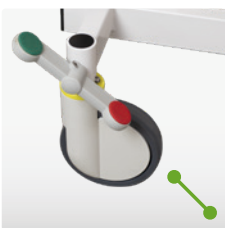

LÅST

Hjulene er låst og sengen står fast.

GRØN PEDAL NED = RETNINGSSTYR ER AKTIVERET



RETNINGSSTYR


Bremsen er frigjort og hjulene i fod- eller hovedene låser.

NØDFIR (mekanisk CPR)

Sengen er udstyret med et rødt håndtag til mekanisk CPR-funktion i tilfælde af hjertestop eller andre akutte situationer.

Betjening: Træk ud i det røde håndtag under sengens rygdal og tryk rygdelen helt ned. Kombiner eventuelt med den elektriske CPR-funktion på personalebetjeningen for samtidigt at få sengen ned i laveste position.

 **Se Brugsanvisningen.**

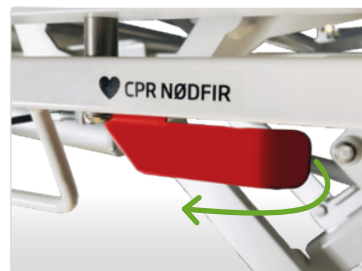

ANVENDELSE OG BEGRÆNSNINGER

Sengen er beregnet til anvendelse på hospitaler.

Sengen er kun beregnet til voksne patienter med en fysisk størrelse på:

HØJDE: Min. 146 cm og max. 195 cm (forlænget = 215 cm).

VÆGT: 40 kg eller mere, dog max. 200 kg.

BMI: Body Mass Index på 17 eller mere.



⚠️ = 200 kg



⚠️ = 265 kg



Max. belastning må IKKE overskrides (Safe Working Load/SWL = 265 kg).



Overhold sengens max. tider i forhold til aktivering og pauser. Driftsfrekvens (10%): Max. 2 min. ON / 18 min. OFF.



Brugere med fysiske eller psykiske begrænsninger må ikke anvende sengens elektriske funktioner uden opsyn, medmindre personalet tillader det og brugeren har fået grundig oplæring.

GENERELLE SIKKERHEDSREGLER

Herunder mulige farer og anvisninger på at undgå dem:



Læs ALTID brugsanvisningen og følg dens anvisninger nøje.



Personalet skal ALTID risikovurdere, om brugeren kan anvende sengen korrekt og sikkert.

KLEMFARE

- Pas på, at ingen kommer i klemme, når sengen betjenes. Der er klemfare mellem sengens bevægelige dele.
- Kig altid på sengen, mens du bruger håndbetjeningerne.
- Vær agtpågivende, når sengen sænkes fra hævet position. Kravl aldrig ind under sengen.
- Vær opmærksom på klemfaren ved utilsigtet aktivering af funktionsknapper, pedaler, sengeheste mm.
- Kontroller, at sengen kan bevæge sig frit op og ned, uden at skade sengen eller ting i nærheden af sengen f.eks. vindueskarmer, radiatorer, hylder, lamper o.l.

FALD FRA SENGEN

- Efterlad ikke brugeren i sengen i højeste position.
- Sænk altid sengen før udstigning.
- Brug sengehesterne.
- Lås altid hjulene efter transport.
- Kravl ikke over gavle og sengeheste for at komme ud af sengen.

- Kontroller at hjulene er låst før forflytning.

VÆLTERISIKO

- Transporter aldrig sengen i højeste position på skrånende eller ujævnt underlag.

FEJLBETJENING

- Overlad kun håndbetjeningen til brugere som du ved, kan bruge sengen og dens funktioner.

EL-SIKKERHED

- Sengen må kun tilsluttes forsyningsnet 230VAC med jord.
- Kontroller, at sengen og andet elektrisk udstyr ikke påvirker hinanden, men fungerer efter hensigten.
- Ved anvendelse af andet elektrisk udstyr i eller ved sengen, skal man sørge for, at ledninger o.l. ikke kommer i klemme.
- Hæng brugerbetjening på sengeheste eller gavle og personalebetjening på en af gavlene, når de ikke anvendes, så ledningerne ikke ødelægges af slag eller stød, tabes på gulvet eller kommer i klemme.
- Kør ikke over ledninger med sengen.
- Hvis sengen ikke fungerer optimalt eller der er synlige skader på elektriske dele, kontakt teknisk afdeling.



Se Brugsanvisningen for mere info.



ADVARSLER

